


PAMETNA URA S3 Z OKSIMETROM IN MERILCEM SRČNEGA UTRIPA

Več funkcijska pametna ura s katero lahko merite srčni utrip, merilnik kisika v krvi, pedometer za štetje korakov, sms opomnik, opomnik na klic, anti-lost funkcija,...

1. PRED PRVO UPORABO

Pred prvo uporabo uro napolnite, uporabite priložen dok za polnjenje naprave, da napolnite zapestnico. 5V napetostni vhod, vmesnik USB2.0, lahko priključite na prenosni računalnik, osebni računalnik, polnilnik mobilnih telefonov in drugo temu primerno opremo.

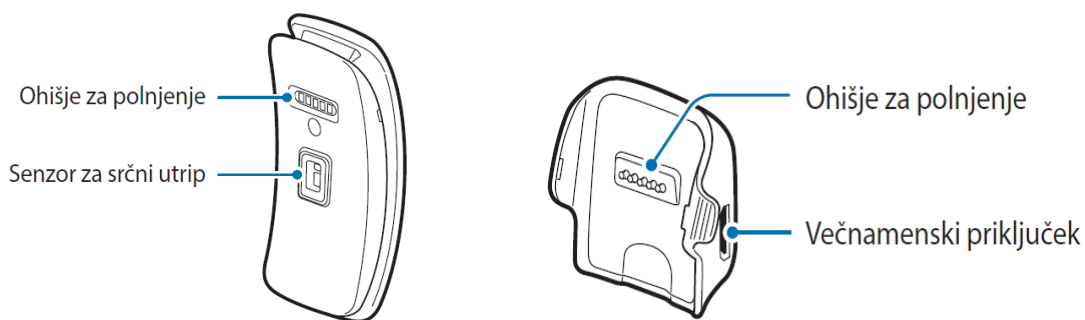

2. OSNOVNI PARAMETRI

Način polnjenja: vmesnik za polnjenje ure- (dok za polnjenje)

Napajalna napetost: DC5V

Polnilni tok 50mA

Tip napajanja: 110MAH polimerna litijeva baterija

Bluetooth standard: prenos podatkov Bluetooth 4.0

Tok pripravljenosti: manj kot 150uA

3. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO URE

Dotaknite se gumba na pametni uri ali podrinite po zaslonu da aktivirate zaslon ali preklapljate vmesnik - (izbirate zelene funkcije). S prstom držite na ekranu 2 do 3 sekunde potrdite možnost vnosa in zaprite možnost. Pametna ura vam bo z vibracijo dala znak, da funkcijo potrdite ali zaprete.


4. NAMESTITVE APLIKACIJE APP ZA PAMETNO URO

V Android storu ali Apple Store vpišite ključno besede "ylesmart" za prenos in namestitve aplikacije. Ali pa skenirajte QR kodo. Ko imate aplikacijo uspešno preneseno na vašo mobilno napravo se morate pred prvo uporabo najprej registrirati, da lahko nemoteno pričnete z uporabo vseh zelenih funkcij, ki jih ponuja ura.


QR CODE




- 4.1. Ko ste aplikacijo uspešno namestili na vaš telefon se najprej registrirajte. Najbolje je, da za uporabniško ime vpišete vašo mobilno številko in si izbere poljubno geslo. In nato vse skupaj potrdite (LOGIN).

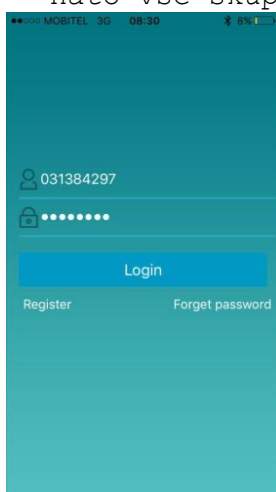

- 4.2. Prikazala se vam bo naslednja ikona (na sliki spodaj) in izberite (settings) gumb, ki je rdečo obkrožen na sliki. POMEMBNO! Ta stran, ki je prikazana na strani vam prikazuje celotno stanje vašega počutja od tega koliko ste športno aktivni, koliko časa počivate, koliko energije ste »pokurili«,...

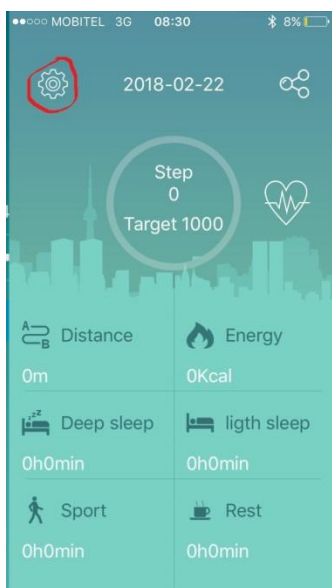


4.3. Na vašem mobilniku se vam bo prikazala naslednja stran in sicer (na sliki spodaj) s katero boste lahko v zadnji stopnji povezali uro in vaš mobilni telefon . Izberite prvo možnost in sicer »Bound Bracelet« pritisnite START in izberite vašo povezavo ki ima oznako »ETO2« vse skupaj potrdite, da povežete vaš telefon z uro. Tako sta napravi se pravi vaš telefon in pametna ura povezana. Na uri se vam bo sedaj tudi avtomatsko nastavil, čas (enak, ki ga imate nastavljenega na vaši mobilni napravi). Dobro je da si kasneje po teh točkah, ki jih prikazuje slika (My information, Goal setting,...) nastavite vaše osnovne podatke, tako, boste uri omogočili, da vam bo prikazala in izračunala vaše točne podatke o vašem zdravju oz. počutju.

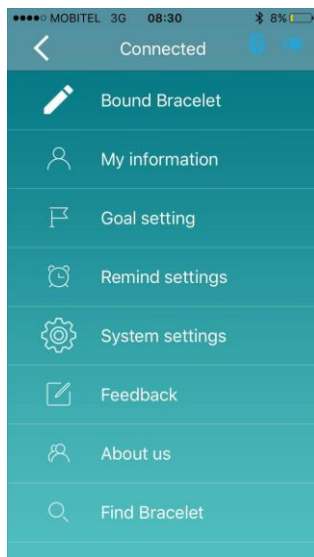

4.4 Uporaba pametne ure: Z enkratnim pritiskom na ekran ure se vam bodo izmenično menjale ikone pedometer- oziroma ikona za štetje korakov, oksimeter- ikona za merjenje kisika v krvi,... In pred vsako uporabo se pravi, če vzamemo za primer:



Na ekranu se vam prikaže s prstom se dotaknite gumba oz. ekrana in držite 2 do 3 sekunde dokler vam ura ne zavibrira

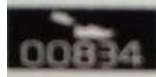

in se prikaže naslednja ikona s katero se vam računa štetje vaših korakov - PEDOMETER. Ko želite s prenehanjem pedometra ponovno s prstom na ekranu držite 2 do 3 sekundi, ko vam ura ponovno zavibrira in vas vrne na začetno stanje.

p.s. V tem zaporedju, ki je opisan v zgornjem primeru upravljate vse funkcije , ki jih omogoča pametna ura.

Se pravi z enim ali več (tipom) pritiskom na uro se vam menjajo funkcije in ko želite npr. da vam izračuna (oksimeter) kisik v krvi držite prst na gumbu oz. ekranu 2 do 3 sekunde dokler vas

ura ne obvesti z vibriranjem in se vam prikaže naslednja ikona, kjer se vam začne merjenje kisika v krvi. Vse to lahko spremljate tudi v vašem telefonu , ko ste povezani z njim in ko imate odprto aplikacijo » Ylesmart«.

5. OBVESTILA ZA UPORABO FUNKCIJE BLUETOOTH

*Da preprečite težave pri povezavi pametne ure z drugo mobilno napravo , postavite napravi čim bolj skupaj.

*Preverite ali je pametna ura in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu povezave Bluetooth (največ 10 m)

*Ime Bluetootha na pametni uri je »ET02« kliknite povezavo. Z zvočnim sporočilom vam bo javilo da sta napravi povezani (connected)

POMEMBNO OBVESTILO!

- Podatki o sinhronizaciji: ko sta povezava APP bluetooth z zapestnico in mobilnim telefonom, so sinhronizacijski podatki popolni. Ročno za beleženje podatkov o korakih sinhronizacije podatkov APP, APP si lahko ogledate zgodovino podatkov o korakih.
- **OPOZORILO!** Ko imate naloženo aplikacijo »Ylesmart« na vašem telefonu se vam bo morda prikazalo opozorilo »Untrusted Enterprise Developer« (nezaupanje vreden dokument). V tem primeru greste pod nastavitve vašega telefona - SETTINGS - GENERAL -DESCRIPTION FILE --- KLIKNETE NA YLESMART IN ----TRUST (ZAUPANJE VREDEN DOKUMENT). Nato se vrnete nazaj na vašo aplikacijo Ylesmart in jo brez težav odprete, kjer se pred prvo uporabo najprej registrirate in si nastavite vse možne nastavitve.

