



## NAVODILA ZA ZUNANJI SLUŠNI APARAT

### 1. Stikalo za vklop in izklop ( on/ off)

Pravi položaji stikala je, kot je prikazano spodaj na sliki:

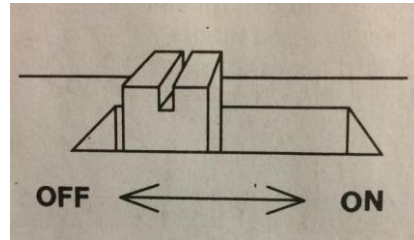

Stikalo je treba obrniti v položaj OFF, če aparat ni v uporabi. S tem zagotovite daljše trajanje baterije.

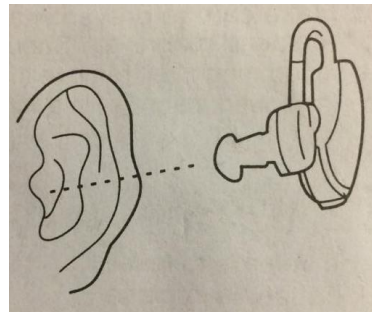


### 2. Nadzor glasnosti

Aparat ima 6 stopenj kontrole volumna. Priporočljivo je da pred prvo uporabo nastavite jakost na 1 stopnjo.

### 3. Namestitev baterije

Odprite pokrov akumulatorja s konico prsta in vstavite baterijo, kot je prikazano spodaj (uporabite 1.5V male baterije)

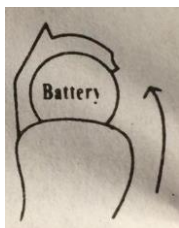

### **PREVIDNOST:**

Ta izdelek ni vodoodporen, zato mora uporabnik poskrbeti, da voda ne bo vstopala v zvočno lupo. Če bi voda vstopila v lupo za zvok, odstranite baterijo in lupo za zvok postavite na toplo mesto, da se posuši.

### **4. Navodila za uporabo**

1. Obrnite glasnost na raven 1
2. Preverite delovanje akumulatorja oz. baterije.
3. Namestite slušni aparat na vaše uho, preden vklopite slušalko neposredno v ušesu.
4. Jakost zvoka si nastavite po potrebi in samo, kadar razmere zahtevajo ojačanje zvokov, kot so filmi, televizija in podobno.

**OBVESTILO:** Postopoma povečajte glasnost, dokler ni na ustrezni ravni. Volumen na stopnji 3 je povprečna raven za večino uporabnikov.

**OPOZORILO:**

Da bi se izognili nenadnemu zvišanju zvonjenja, je potrebno postopno povečati nadzor glasnosti. Zvok povečevalec ni pomoč za slušne aparate za osebe z okvarjenim sluhom. Če imate probleme s sluhom, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Proizvajalec : made in china  
Uvoznik: Rossi netshop